

国家甲类医保项目，专机专用一次性耗材

JINRON 兢仁

国内首批获准上市的经皮给药临床治疗产品，20余年来持续更新，专注经皮给药领域；
无创治疗靶向导入，效果更快速更精准。

中医定向透药治疗仪




产品简介

PRODUCT INTRODUCTION

中医定向透药治疗仪是一款集热疗、磁疗和脉冲电等现代技术于一体的靶向给药治疗仪，可极大缩短药物经皮给药的迟滞时间，直接发挥药物治疗作用，透药深度可达深层组织，使皮肤和组织对药物的通透性大大增加，通过特定穴位给药，在靶组织内形成药物高浓度浸润区，直接发挥药物治疗作用，达到靶位精确治疗的目的，20余年来我们不断更新产品，以达到用户体验最大化，该产品经过数千家医院临床使用验证，临床疗效、产品质量和售后服务都深受医生及经销商的一致好评。

中医定向透药治疗系统原理示意图

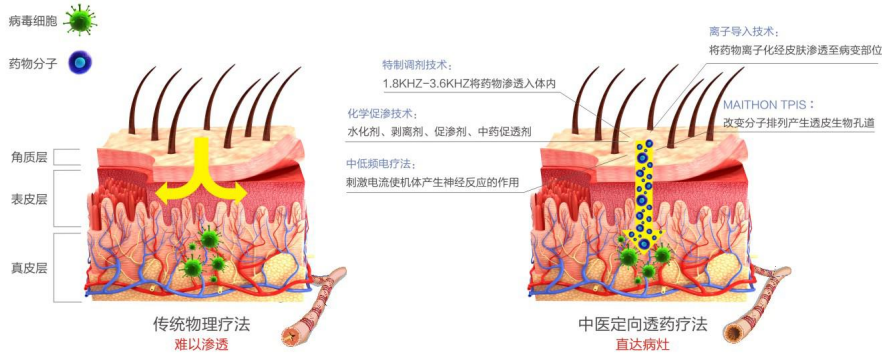

治疗优势：精、准、快

TREATMENT ADVANTAGE

- 快速：给药速度快，起效快、作用直接，比自然渗透快5~100倍；
- 深度：对药物产生定向的推动力、引导力、使药物中的有效成分更深入、更有效地透过皮肤快速进入人体，可深达皮下；
- 浓度：药物浓集于靶区，对病灶实施精确治疗；可有效避免药物血药浓度峰谷现象，降低了毒副作用；
- 药效：药效稳定持久，持续时间是口服给药的4倍；
- 无创、便捷、无交叉感染，使用方便；
- 避免肝脏的首过效应和药物在胃肠道的降解。

适用科室

APPLICABLE DEPARTMENT

- 消化内科：消化不良、慢性胃炎、结肠炎、肠粘连、阑尾炎、直肠炎、腹泻腹胀、便秘
- 儿科：小儿腹泻、小儿肺炎、肺炎引起的咳嗽、小儿便秘
- 妇科：经期腹痛、妇科炎症
- 骨伤科：软组织扭伤、消炎止痛等
- 普外科：腹部及腔内手术后的康复治疗
- 康复科：关节炎、颈椎病、腰肌劳损、坐骨神经痛、
软组织挫伤、肌肉酸疼

使用方法

METHOD OF APPLICATION


使用一次性电极贴片时，根据不同科室，选用不同耗材；首先把包装袋内的透药内托平整面贴在或者吸附在治疗头上，然后将棉芯放置在透药贴凹槽内，最后分别贴于病灶部位和相关穴位，配合绷带，使其紧密接触皮肤，即可进行处方治疗。

疗法对比


疗法	缺点	优点
中医定向透药治疗	需要一定的治疗周期	无创伤，无痛苦， 复发率低，近期和远期 疗效较好的一项创新疗法
口服药	影响胃肠道 对肝肾毒副作用大	使用方便
注射药	会疼、有创伤安全性及 机体适应性差	短期效果明显
搽剂、贴剂	不能穿透皮肤， 疗效得不到保证	避免对肠胃及肝肾 的毒副作用
针灸	病人痛苦、技术操作性强	效果明显
推拿按摩	费时耗力	无痛苦

技术优势

TECHNOLOGICAL SUPERIORITY

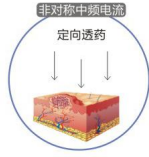

1、定向透药 直达病灶
仪器特设的非对称中频电流，保留了一定能量的负向脉冲，皮肤组织细胞重新排列，促进皮肤电阻下降，扩张小动脉和毛细血管，血管壁透性增加，改善局部血液循环，对药物离子产生定向的推动力。

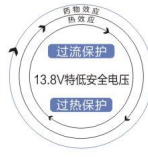

2、温热治疗 安全有效
热疗是中医常用的祛风除湿治疗方法，可通经活络、促进血液循环、加速水肿的吸收消散。本仪器可使药物在热雾器内被加热，激活而雾化成分子微粒，形成涡流和雾场，引导药物分子向体内深层移动，达到“定向透药”目的。



3、螺旋动态 生物磁疗
动态生物磁场，一定剂量的磁场作用于人体穴位可以调和气血、疏通经络，有明显的止痛、消炎、活血化瘀的功效。



4、数码仿生 按摩理疗
仪器选用新型微电脑芯片，对中频电流的调制方式进行了模仿人手按摩功能，即动态多元仿生调制，使患者在治疗过程中，充分感受到多种仿生按摩手法，治疗更贴近人体的自然状况，不仅提高了疗效，而且更加舒适。




5、综合治疗 更多选择
可同时或选择地进行定向透药、热疗、磁疗、按摩等处方治疗，使各种治疗机理相互补充，更充分的调节人体的生理机能、改善微循环、增强免疫功能。

临床参考

症状	治疗部位	临床应用
颈肩腰腿疼/肩周炎	病变部位或疼痛点（阿是穴）	每次30分钟， 每日一次
小儿肺炎	肺俞穴（第三胸椎棘突下，背中线旁开二指处）或左右肩胛下区	
小儿腹泻	脐部、关元穴	
消化不良/慢性胃炎	固定于病变投影区（上脘、中脘、脾俞、胃俞穴）	
腹部手术后疼痛，肠粘连	作用于腹部（阿是穴）	
阑尾炎/结肠炎	作用于腹部（阿是穴）	
盆腔炎	固定于病变投影区（子宫、次髂、关元、腰俞、阿是穴）	
软组织扭挫伤	作用于痛点（阿是穴）	

部分客户名单

吉林大安市中医院	河南省省立医院	徐州妇幼保健院	济南市中区人民医院	北京东城区中医儿童医院
漯河第三人民医院	郑州市儿童医院	安徽宿州中医院	中山小榄镇人民医院	重庆垫江红十字会医院
黑龙江省儿童医院	漯河妇幼保健院	广安第二人民医院	河北省中医院	重庆医科大学附属第一医院
北京惠民儿童医院	河北邯郸中医院	云南昆明市中医院	安徽省立医院	呼和浩特市妇幼保健院
武汉市妇幼保健院	桂林市人民医院	湖北钟祥市中医院	云南省中医院	昆明市妇幼保健院

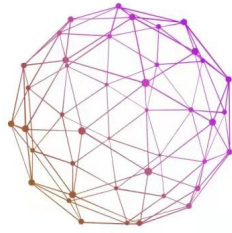

关于兢仁

ABOUT US

河南兢仁医疗生物科技有限公司定位以前沿高新技术为核心，致力于医疗设备、生物技术及中医技术的研发和解决方案服务商，总部位于郑州市。公司通过自主创新研发为各级医疗机构多科室提供精准康复医疗设备和创新治疗方案，涵盖消化内科、神经内科、烧伤科、心内科、骨科、眼科、康复科等多科室，普及高端精准康复医疗、掌握行业核心技术、提升服务品牌价值。

人才和创新是发展的源泉，应用和普惠是发展的目的。公司形成了“传承、创新、突破、引领”的发展理念和“以客户为中心、以市场为导向、以创新为标准”产品研发思路，致力于与国内著名医学院校和科研机构开创性的建立战略性联创孵化平台、产学研开发机制。汇集一批掌握国内外高新技术的生物、医学、光学、机械、电子及计算机技术的高级人才。

国家医保甲类收费项目与编码

全国统一编码	项目名称
420000013/PBBA1101	中医定向透药疗法
340100010	中频脉冲电治疗
340100009	低频脉冲电治疗
430000023	穴位贴敷治疗
340100019	磁疗

产品规格

操作语言	中文
型号	BE-5000型/BE-3000型
治疗时间	10mins-30mins
规格	四通道/两通道
款式	台式推车
环境温度	5°C—40°C
电源适用范围	AC.220±22V, 50±1Hz
连续工作时间	不小于8小时

河南兢仁医疗生物科技有限公司
Henan jingren Medical biotechnology co., LTD
地址：河南·郑州市郑东新区和顺街6号B栋6层

www.jrenmed.com
Jrenmed@163.com

兢仁医疗全国销售热线：0371-5678 3899

